



## **LA MINERVE CORSELET**

Vous recevez dans votre service un patient portant une minerve corselet. Cet appareillage a pour objectif de maintenir la colonne cervicale.



### **La surveillance**

Le port de cet appareillage nécessite une surveillance accrue des points d'appuis et de l'état cutanéotrophique. Les plus courants sont :

- Le menton
- L'occiput
- Les clavicules

Pour surveiller ces points, il vous faut retirer l'appareillage. Pour ce faire :

- Descendre les deux fermetures éclairs
- Retirer la partie antérieure de l'appareillage et vérifier l'état de la peau au niveau du menton et des clavicules (Attention, ne pas retirer le bandeau frontal lors de cet étape)

- Une fois la vérification faite, remettre la partie antérieure et la maintenir avec la main
- Lorsque le patient a le menton bien positionné dans la valve antérieure, retirer le velcro du bandeau frontal et retirer la valve postérieure pour vérifier l'état de la peau au niveau de l'occiput
- Une fois la vérification faite, la valve peut être remise

Un point d'appui qui doit inquiéter le personnel soignant est un point qui ne disparaît pas lorsque l'appareillage est retiré. Si vous observez que la trace rouge ne disparaît pas ou est de plus en plus marquée au fur et à mesure des jours de port, contactez-nous.

### **Points particuliers**

- Une hygiène correcte est nécessaire pour limiter le risque d'escarre
- Pour les hommes, le frottement des poils de barbe sur la mentonnière peut être douloureux. Privilégier un rasage de prêt ou mettre un jersey entre la peau et l'appareillage.
- Un maillot de corps devra TOUJOURS être porté sous l'appareillage

En cas de difficultés, de questions, ou de point d'appuis très marqués, veuillez contacter la société T20 au 06 14 41 43 61 pour une adaptation de l'appareillage.