




## FRACTURE DIAPHYSE HUMÉRALE



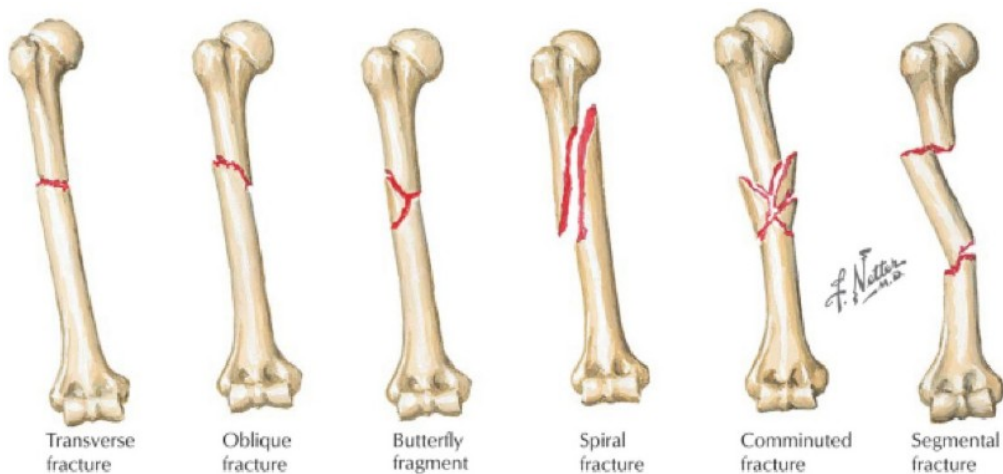


Le Sarmiento est un dispositif d'immobilisation sur mesure dans les cas de fracture diaphysaire humérale. Il limite les mouvement d'abduction et de rotation du bras.

Le dispositif permet de :

- conserver la flexion et extension du coude
- limiter la rotation du bras
- mobiliser le coude et le poignet rapidement



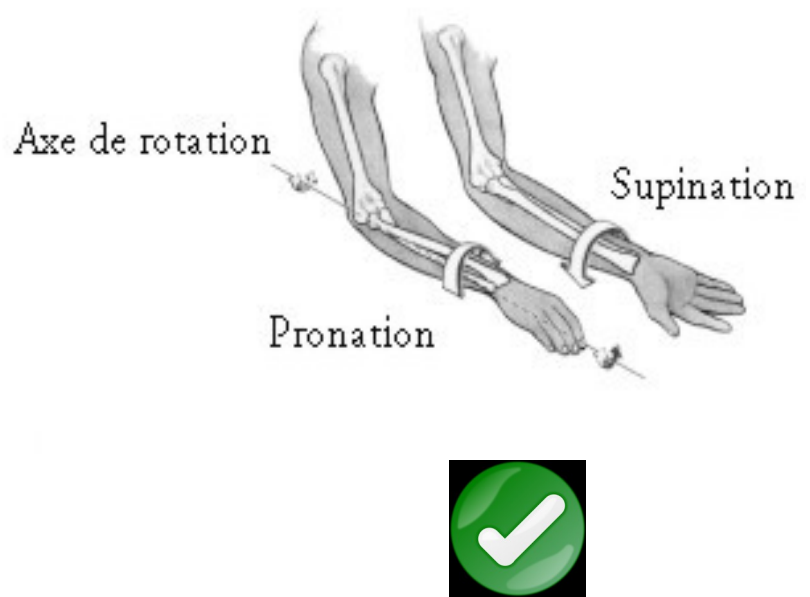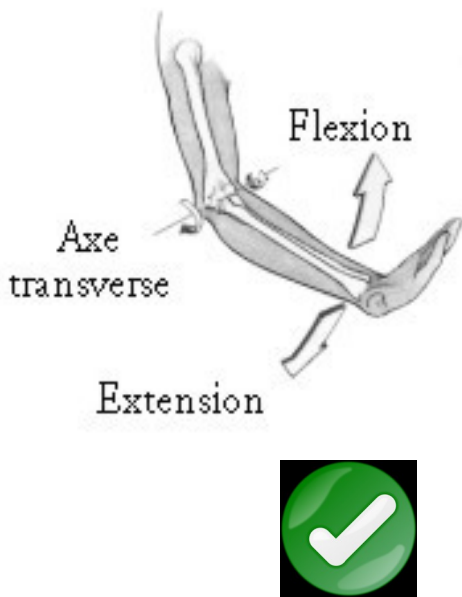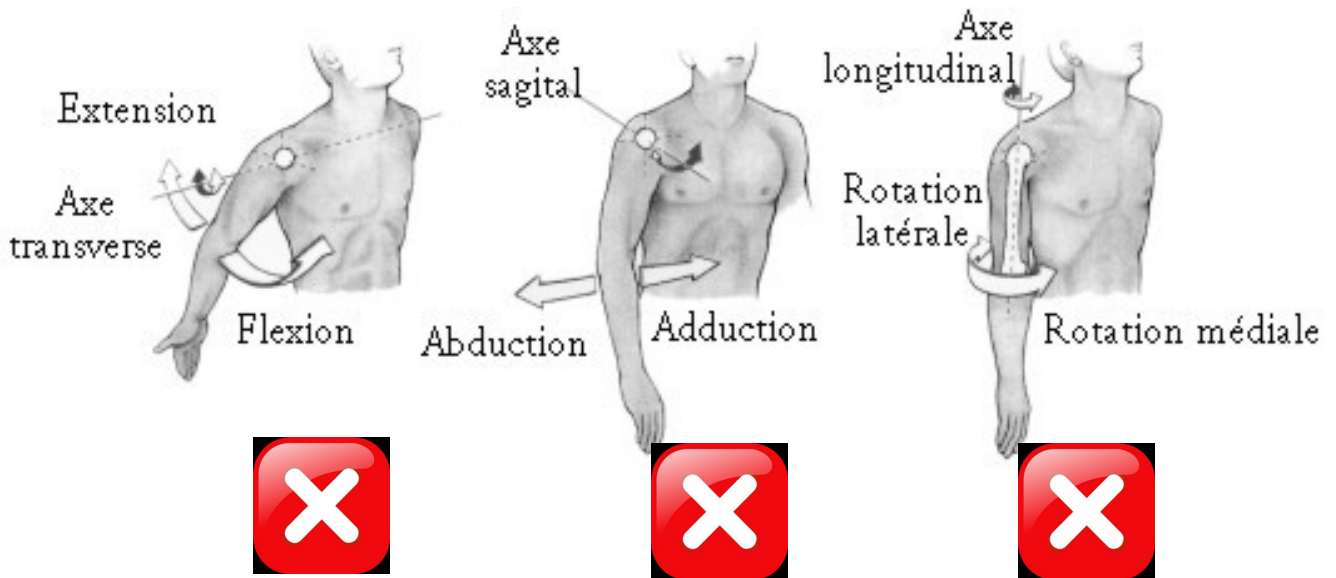



## CONSEILS DE PORT

- Les articulations non immobilisées doivent être utilisées pour éviter l'enraidissement
- Éviter de tirer, pousser ou porter avec la main.
- La durée et les conseils de port (jour et/ou nuit) seront définis par votre médecin.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

- Éviter tout contact de l'orthèse avec de l'eau pour limiter les phénomènes de macération
- Vous pouvez protéger l'attelle avec un sac plastique et un élastique ou utiliser une protection adaptée



- Nettoyer l'orthèse à l'eau tiède et au savon. Bien essuyer l'orthèse avant de la remettre en place.
- Éviter de poser l'orthèse à proximité de sources de chaleur (ex : pare brise voiture) .